

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Введите иглу со стилетом перпендикулярно поверхности кости. Игла устанавливается путем вертикального надавливания и поворачивания ее слева направо вокруг своей оси.

Как только сопротивление продвижению иглы уменьшится, остановите проникновение иглы и выньте стилет для открытия камеры сбора биоптата.

Применяйте защитный колпачок для обеспечения асептичности последующего проникновения.

Введите освобожденную от стилета иглу еще на 2-3 см, совершая вращательные движения примерно на 45° влево и вправо.

Снимите защитный колпачок и аккуратно вставьте градуированный стилет для проверки размеров полученного биопсийного образца. Если размер полученного образца недостаточен, выньте градуированный стилет и введите иглу еще дальше с помощью вращательных движений. Если размер образца удовлетворительный, приступайте к операции по его отделению.

ВЕРСИЯ F:

Вставьте вилку до соединения ее захвата с зажимом Луэра иглы.

Поверните иглу не менее чем на 360°: на этом этапе очень важно как не погрузиться в ткань, так и не извлечь иглу.

Удалите вилку и, используя стилет, извлеките биоптат. Если не требуется выполнение других операций, извлеките иглу, потянув ее и при этом, вращая на 45° вправо и влево, пока игла полностью не выйдет из кости.

ВЕРСИЯ M:

Вставьте лопатку до соединения ее захвата с зажимом Луэра иглы.

Поверните иглу не менее чем на 360°: на этом этапе очень важно как не погрузиться в ткань, так и не извлечь иглу.

Извлеките иглу, потянув ее и вращая на 45° вправо и влево, пока игла полностью не выйдет из кости.

Снимите лопатку с иглы и достаньте образец с помощью стилета.

По окончании процедуры утилизируйте все устройства и аксессуары, принимая необходимые меры предосторожности касательно потенциально зараженных материалов.

После использования изделия утилизируйте его вместе с прочими медицинскими отходами согласно действующим правилам.

Примечание: Если необходимо выполнение аспирации, эксплантации или перфузии костного мозга, вставь-

те соответствующий шприц в конус Луэра и проводите аспирацию.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Данная изделие предназначено для использования только квалифицированным медицинским персоналом. MEDAX не несет никакой ответственности за причиненный пациенту ущерб, если изделие применялось не по назначению, использовалось неквалифицированным персоналом или не соблюдалась инструкция по применению.

Описанная выше процедура эксплуатации предназначена для обязательного исполнения: к использованию данного изделия должны допускаться только опытные медицинские профессионалы.

Не совершайте боковых движений иглой в канале при отсутствии мандрена в канале.

Во избежание повреждения стальной канюли избегайте сильных и быстрых движений вперед и назад, а также сильно больших наклонов иглы при заборе материала для биопсии.

Данное апиrogenное, стерильное изделие однократного применения ни в коем случае не должно использоваться повторно, подвергаться стерилизации или ремонту.

Проверяйте целостность упаковок и срок годности продукции перед использованием.

Изделие не подлежит эксплуатации, если упаковка распечатана, повреждена или увлажнена.

Храните в прохладном и сухом месте, избегайте воздействия на изделия светового излучения и высоких температур.

Поставщик: ООО «МедКом»

ОГРН: 1057746862249

Склад: г. Москва, Харьковский пр-д, д. 2 оф. 156

тел. +7(495)142-95-55

<https://medax.ru>